

# Cómo utilizar su implante



**SERIE AMS 700™ DE IMPLANTES DE PENE INFLABLES**



Su urólogo es la mejor fuente de que dispone para obtener más información. El especialista es quien mejor conoce su situación médica y puede ayudarle a obtener los mejores resultados posibles del implante de pene.

También puede visitar nuestro sitio web [www.tratamientosdisfuncionerectil.es](http://www.tratamientosdisfuncionerectil.es)



1. AMS 700™ with MS Pump™ Series Patient Manual. Information and Instructions for Patients Considering an Inflatable Penile Prosthesis. American Medical Systems, Inc. 2019.
2. AMS 700 Penile Prosthesis with MS Pump Operating Room Manual. American Medical Systems, Inc. 2018.

Todas las marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.  
PRECAUCIÓN: Las leyes solo permiten la venta de estos dispositivos bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se encuentran en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Estos productos se muestran únicamente con fines INFORMATIVOS y es posible que no estén aprobados o no se puedan vender en determinados países. Material no concebido para su uso en Francia.  
Producto solo disponible en el Espacio Económico Europeo (EEE).  
Compruebe la disponibilidad con su representante de ventas local o con el servicio de atención al cliente.  
Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  
MH-1085801-AA. Producido por Gosling.



[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

Copyright 2022 © de Boston Scientific Corporation o sus afiliados. Todos los derechos reservados. DINURO2483SA

# El implante de pene inflable AMS 700™

El implante de pene inflable AMS 700 consta de tres componentes conectados por tubos (Figura 1): un reservorio, dos cilindros y una bomba para inflar y desinflar.

El reservorio, que se implanta en la parte inferior del abdomen, retiene el líquido hasta que usted decida inflar los cilindros.

Los dos cilindros se introducen uno al lado del otro en el cuerpo del pene.

La bomba, que consta de una pera de inflado y un botón de desinflado, se implanta en el escroto.

La bomba se usa para inflar y desinflar los cilindros transfiriendo el líquido de los reservorios a los cilindros.

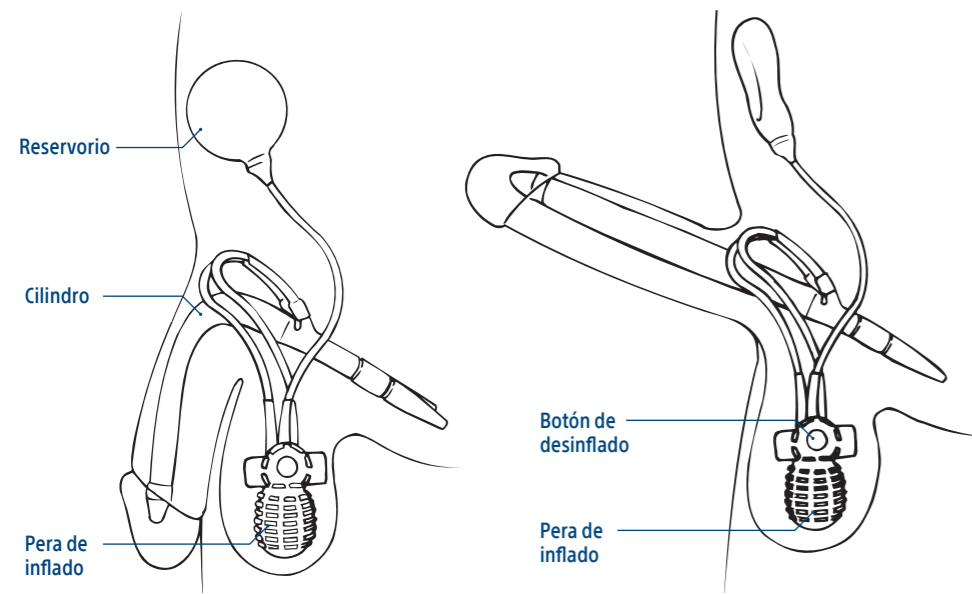


Figura 1

## Inflado del implante<sup>1</sup>

Cuando presione y suelte la pera de inflado, el líquido saldrá del reservorio, pasará a través de la bomba y se dirigirá a los cilindros. Cuando los cilindros se llenan de líquido, el pene se pone erecto.

1. Palpe la bomba en el escroto.
2. Sujete con una mano los tubos por encima del bloque de desinflado para mantener la bomba en posición (Figura 2). Si usa el sistema para una sola mano, sostenga la pera de inflado con la mano dominante mediante las yemas de los dedos pulgar e índice (y el dedo corazón) para sujetarla.
3. Con el pulgar y el índice de la otra mano localice la pera de inflado con forma redondeada.
4. Primero apriete la pera de inflado de forma rápida y firme, y después suéltela para activar la bomba (Figura 3). Es posible que note o escuche un chasquido cuando la solución salina mueva la válvula del interior de la bomba hasta la posición activada.
5. Los accionamientos posteriores de la pera de inflado pueden ser más lentos. Si la suelta, la pera de inflado vuelve a llenarse de líquido. Continúe apretándola y soltándola alternativamente hasta que los cilindros se hayan llenado de líquido y alcancen la erección. Es posible que tenga que apretar la pera varias veces para alcanzar una erección completa. Asegúrese de consultar con su médico cuántas veces debe apretar la pera.

**No apriete NUNCA el botón de desinflado mientras esté apretando la pera de inflado.**

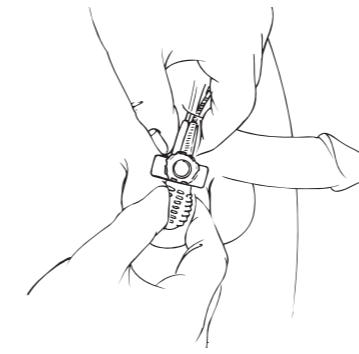


Figura 2

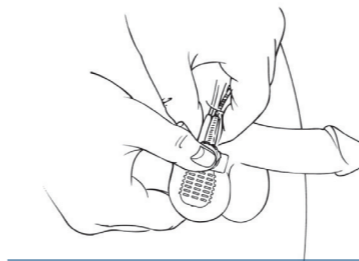


Figura 3

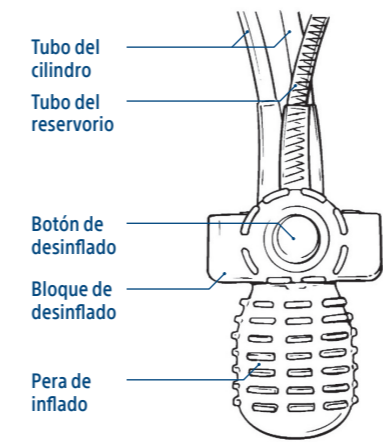


Figura 4

## Desinflado del implante<sup>1</sup>

Cuando apriete el botón de desinflado durante unos cuatro segundos, el líquido comenzará a salir de los cilindros y volverá al reservorio. El pene se vuelve blando (flácido).

1. Palpe la bomba en el escroto.
  2. Sujete con una mano los tubos por encima del bloque de desinflado (Figura 4) para mantener la bomba en posición (Figura 3).
  3. Con la otra mano, localice el botón de desinflado que sobresale del bloque de desinflado (Figura 4).
  4. Para apretar de manera eficaz el botón de desinflado, debe colocar el pulgar y el índice a ambos lados del bloque de desinflado.
  5. Apriete el botón de desinflado durante unos 4 segundos y luego suéltelo. Los cilindros continuarán desinflándose y el pene quedará flácido.
- No apriete NUNCA el botón de desinflado mientras esté apretando la pera de inflado.**
6. Cuando los cilindros se hayan desinflado, puede apretarse el pene para aumentar su flacidez.

## Solución de problemas de la pera de inflado<sup>2</sup>

**Cuando la pera de inflado presente hoyuelos o pliegues, o sea difícil o imposible inflar los cilindros:**

1. Apriete el botón de desinflado para volver a llenar la pera de inflado.
2. A continuación, reactive la bomba con un apretón FUERTE Y RÁPIDO de la pera de inflado.
3. Infle el dispositivo de manera normal.

**Si no se resuelve el problema:**

1. Apriete el bloque de desinflado por los lados para volver a llenar la pera de inflado.
2. Apriete el botón de desinflado durante 2-4 segundos para restablecer el implante.
3. Reactive la bomba con un apretón FUERTE Y RÁPIDO de la pera de inflado.
4. Infle el dispositivo de manera normal.

Si no logra inflar el dispositivo y el tubo está acodado, pruebe la técnica del tirón y la extensión. Se tira del pene, estirándolo hacia afuera, arriba, abajo y de lado a lado 2-3 veces para eliminar el acodamiento del tubo, para que los cilindros se puedan inflar.

**No apriete NUNCA el botón de desinflado mientras esté apretando la pera de inflado.**

**No apriete NUNCA los extremos del bloque de desinflado mientras esté apretando la pera de inflado al mismo tiempo.**